



Montaż urządzenia UROPEN® jest bardzo prosty. W czasie montażu przyrządu lub wykonywania czynności higienicznych należy zwrócić uwagę aby nie uszkodzić części elastycznych.

* cewnik zewnętrzny UROCEV (1) przed założeniem w majteczkach (2) należy umyć pod bieżącą wodą i dokładnie wysuszyć.

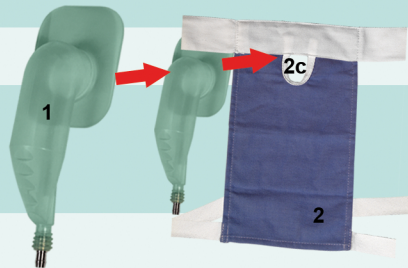


* cewnik zewnętrzny UROCEV (1) należy przełożyć w majteczkach (2) poprzez otwór (2c) tak, aby kołnierz cewnika opierał się na majteczkach (2).

* do worka (3) należy przymocować taśmy mocujące:
- dłuższą taśmę (4a) w części górnej worka, gdzie znajduje się wąż (3a) oraz zawór odpowietrzający (3b),
- taśmę mocującą krótszą (4b) należy zamontować na worek (3) w jego dolnej części, gdzie znajduje się zawór spustowy moczu (3c).

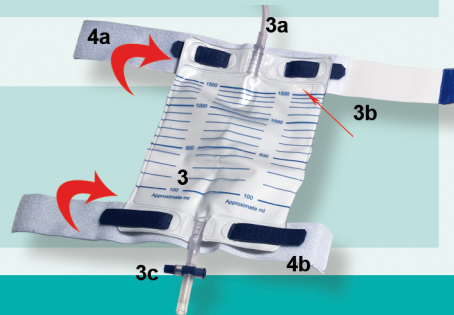

* tak przygotowane elementy tj. majteczki (2) z zamontowanym cewnikiem zewnętrznym (1) i worek do zbiórki moczu (3) należy połączyć ze sobą, nakładając wąż (3a) na łącznik metalowy (1a).

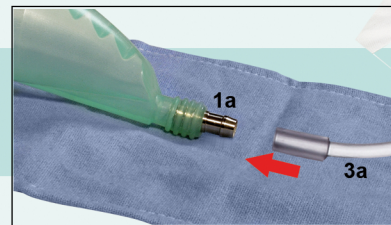

* należy zwrócić uwagę, aby zawór spustowy (3c) był zamknięty.